

# Masque-barrière réalisé par des bénévoles de Noyelles-sur-Selle

suivant les données officielles et validé par le corps médical.

**Attention, le masque doit être lavé avant sa première utilisation.**

Le masque-barrière, réalisé grâce à la solidarité citoyenne, est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment **aux personnes saines** et ne présentant pas de symptômes d'infection virale et **n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes.**

*Ce masque est de confection artisanale.*

Son port est limité à une 1/2 journée et permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration du virus dans la zone « bouche et nez ».

L'utilisation du masque barrière est envisagée par exemple pour une personne quittant son domicile pour se rendre à son travail ou effectuer des achats de première nécessité.

**Avertissement** : Le port du masque n'exonère absolument pas des gestes barrières (lavage des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique) complétés par la mesure de distanciation sociale et le confinement qui sont essentiels.

### Nettoyage du masque :

Le masque est en coton et doit être lavé au moins à 60°Celsius et après chaque utilisation.

### Mode d'emploi :

- *bien se laver les mains avant de le poser sur le visage*
- *l'ajuster pour couvrir le nez et la bouche jusque sous le menton*
- *une fois posé, ne plus toucher le masque avec les mains*
- *le retrait ne peut se faire qu'après s'être lavé les mains et en tenant uniquement les brides ou élastiques ; le déposer dans un sachet plastique fermé en attendant le lavage.*
- *Ne pas utiliser ce masque une fois souillé ou mouillé ! Attention, il doit être à usage unique, pour une seule sortie.*  
*Si besoin d'une sortie supplémentaire, laver le masque !!!*

**Prenons soin de nous et de nos proches !  
Restons chez vous et adoptons tous les gestes-barrières.**